

Clearblue

Schwangerschaftstest VISUAL

Clearblue VISUAL ist über 99% zuverlässig ab dem Fälligkeitstag der Periode
Clearblue VISUAL kann bis zu vier Tage vor Fälligkeit der Periode durchgeführt werden. *Lesen Sie hierzu bitte Frage 3.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.

Bevor Sie beginnen

Es ist hilfreich, bei der Durchführung des Tests eine Uhr zur Hand zu haben.

1 DURCHFÜHREN DES TESTS

Wenn Sie ab dem Fälligkeitstag der Periode testen, können Sie den Test zu jeder Tageszeit machen. Wenn Sie vor dem Ausbleiben der Periode testen, verwenden Sie hierfür bitte Morgenurin (erster Urin nach dem Aufwachen).

- Wenn Sie bereit sind zu testen, nehmen Sie ein Teststäbchen aus seiner Folienverpackung und nehmen Sie die blaue Schutzkappe ab. Testen Sie unmittelbar danach.

MIT IHREM URIN TESTEN

Sie können die Testspitze direkt in Ihren Urinstrahl halten **oder** eine Urinprobe in einem trockenen, sauberen Gefäß sammeln und die Testspitze hineintauchen.

- Halten Sie die sich färbende Testspitze nach unten

Unter **Frage 7** finden Sie weitere Informationen, wenn sich die sich färbende Testspitze nicht vollständig rosa verfärben sollte.

Schutzkappe Sich färbende Testspitze



entweder in Ihren Urinstrahl **oder**, wie gezeigt, für volle **5 Sekunden** in Ihre gesammelte Urinprobe.

- Die sich färbende Testspitze färbt sich rasch rosa, um zu zeigen, dass sie Urin aufnimmt. **Sie müssen die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urin halten.**



Halten Sie die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urin.



Beginnen Sie mit der Zeitnahme, sobald Sie sehen, dass sich die Spitze rosa verfärbt.

Urinstrahl

ODER

Entnommene Probe

- Halten Sie die sich färbende Testspitze weiterhin nach unten oder legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage, bis Sie das Ergebnis ablesen können und in dem Kontrollfenster eine blaue Linie erscheint.
- Wenn Sie möchten, können Sie die Schutzkappe wieder auf die Testspitze setzen.

2




WARTEN Sie 3 Minuten.

Während sich der Test entwickelt, erscheinen blaue Linien.

3 ABLESEN DES ERGEBNISSES NACH 3 MINUTEN

- Sie können Ihr Ergebnis nun im **Ergebnisfenster** ablesen.
- Lesen Sie das Ergebnis erst ab, wenn eine blaue Linie im Kontrollfenster erschienen ist. Diese Linie zeigt an, dass der Test korrekt beendet ist.**
- Sollte innerhalb von **10 Minuten** keine blaue Testlinie im Kontrollfenster erscheinen, hat der Test nicht funktioniert (**Lesen Sie bitte Frage 8**).

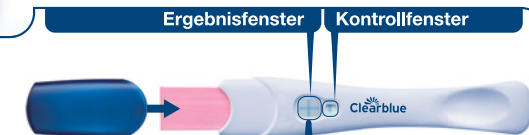

Nicht Schwanger

Schwanger



Wenn Ihr Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet, finden Sie unter **Frage 13** im Abschnitt Fragen & Antworten weitere Informationen.



Abbildung A



Abbildung B



Abbildung C

Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, finden Sie unter **Frage 14** im Abschnitt Fragen & Antworten weitere Informationen.

Wenn die Linien im Ergebnisfenster ein Pluszeichen (+) bilden, lautet das Ergebnis „Schwanger“, unabhängig davon, ob eine der Linien heller oder dunkler ist als die andere.

WICHTIG!

Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Veränderungen nach Ablauf dieser Zeit sind nicht gültig. Wenn Sie sich noch unsicher bei Ihrem Ergebnis sind, finden Sie unter **Frage 9** weitere Informationen.

Fragen und Antworten

Wie zuverlässig ist Clearblue VISUAL?

Labortests haben gezeigt, dass der Clearblue VISUAL ab dem **Fälligkeitstag der Periode über 99% zuverlässig ist.**

Wie funktioniert Clearblue VISUAL?

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration im Körper steigt in der Frühschwangerschaftsphase stetig an. Clearblue VISUAL kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/mL).

Wann kann ich den Test mit Clearblue VISUAL durchführen?

Sie können mit dem Clearblue VISUAL bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode testen. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode testen und das Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“, ist es trotzdem möglich, dass Sie schwanger sind. Die untenstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Testreihe mit Clearblue VISUAL in der Frühschwangerschaft.

*Früh testen

Clearblue empfiehlt Ihnen, erst ab dem Fälligkeitstag der Periode zu testen. Allerdings steigt das Schwangerschaftshormon in der Frühschwangerschaft schnell an und mit Clearblue VISUAL können Sie bereits bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen. Eine klinische Studie mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft und mit Clearblue VISUAL ergab folgende Ergebnisse:

Anzahl der Tage, vor der Fälligkeit der Periode	-1	-2	-3	-4
% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ bekommen haben	98 %	97 %	88 %	56 %

Muss ich Morgenurin verwenden?

Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen wollen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Morgenurin. Ansonsten können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Vermeiden Sie vor dem Test eine übermäßige Flüssigkeitsaufnahme.

Ich bin mir nicht sicher, wann der Fälligkeitstag meiner Periode ist. Woher weiß ich, dass ich den Test zum richtigen Zeitpunkt mache?

- Um herauszufinden, wann Ihre Periode fällig ist, berechnen Sie Ihre Zykluslänge, indem Sie die Anzahl der Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen.
- Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monaten ausgehen, bevor Sie testen.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre nächste Periode einsetzen soll, empfehlen wir, den Test frühestens 19 Tage nach dem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchzuführen.
- Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ ist und Sie vermuten weiterhin, dass Sie schwanger sind, lesen Sie bitte **Frage 13**.

Können Medikamente oder Erkrankungen mein Ergebnis beeinflussen?

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der einzunehmenden Arzneimittel, bevor Sie einen Test durchführen. Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen (Diese Arzneimittel werden üblicherweise initiiert. Wenn Sie früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind).
- Andere fruchtbarkeitsregulierende Behandlungen (z.B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z.B. Pille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie vor Kurzem ein hormonelles Verhütungsmittel abgesetzt haben oder eine fruchtbarkeitsregulierende Behandlung (z.B. mit Clomiphencitrat) durchgeführt haben, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein. Dadurch könnten Sie den Test möglicherweise zu früh durchführen.
- Wenn Sie vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten.

- Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (z.B. im Eileiter), Zysten am Eierstock, die Wechseljahre und einige extrem seltene Erkrankungen können das Testergebnis verfälschen.
- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann es sein, dass Sie später herausfinden, dass Sie doch nicht schwanger sind, weil die Schwangerschaft auf natürliche Weise beendet wurde, was in der Frühschwangerschaft passieren kann.

Wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis erhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Ich habe den Schwangerschaftstest verwendet, aber die sich färbende Testspitze hat sich nicht vollständig rosa verfärbt. Was soll ich jetzt machen?

Wenn sich die sich färbende Testspitze nicht vollständig rosa verfärbt hat, haben Sie möglicherweise nicht genügend Urin verwendet. Sollte aber dennoch die blaue Kontrolllinie im Kontrollfenster innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung des Tests zu sehen sein, dann ist der Test korrekt abgelaufen. Wenn innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint, dann finden Sie unter **Frage 8** weitere Informationen.

Ich habe den Schwangerschaftstest durchgeführt, aber im Kontrollfenster ist keine blaue Linie erschienen. Was soll ich jetzt machen?

- Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen. Gründe dafür könnten die folgenden sein:
- Die sich färbende Testspitze wurde nicht unten gehalten oder der Test nach der Durchführung nicht auf eine flache Unterlage gelegt.
- Möglicherweise haben Sie zu viel oder zu wenig Urin verwendet. **Halten Sie die Testspitze für genau 5 Sekunden in den Urin.**

Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen und halten Sie sich genau an die Anwendungshinweise. Sie können Ihren Urin auch in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und nur die sich färbende Testspitze für 5 Sekunden in die Urinprobe eintauchen.

Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?

- Für das Ergebnis „Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach Testdurchführung eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein '+' Symbol im Ergebnisfenster erscheinen.
- Das Erscheinungsbild des Pluszeichens (+) im Ergebnisfenster kann variieren. Allerdings sollten die beiden Linien des Pluszeichens und die Linie im Kontrollfenster etwa die gleiche Breite haben (siehe Abbildungen A-C).

Abbildung A Diese Abbildung zeigt das Ergebnis „Schwanger“. Diese Art der Anzeige ist wahrscheinlicher, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG Konzentration in Ihrem Urin möglicherweise relativ gering ist.

Beratungsservice

Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00–16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 08005 954 015* AT 0820 001 148 0844 000 018****

*Anrufe sind kostenlos. **Telefongebühren variieren; bitte mit Ihrem Telefonanbieter prüfen. Bitte halten Sie die Chargennummer (LOT) bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.

IVD	Medizinprodukt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-Code		Nicht wiederverwenden
	Temperaturbegrenzung 2°C – 30°C		Verwenden bis		Hersteller

Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.
© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Clearblue ist eine Marke.

Abbildung B

Diese Art der Anzeige ist nicht ungewöhnlich, wenn Sie schwanger sind und am oder um den Tag der Fälligkeit Ihrer Periode testen, da die hCG Konzentration möglicherweise immer noch relativ gering ist.

Abbildung C

Dieses Bild ist wahrscheinlicher, wenn Sie schwanger sind und einige Tage nach dem Fälligkeitstag der Periode testen, da die hCG Konzentration dann bereits höher ist.

- Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Anwendungshinweise. Für das Ergebnis „Nicht Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Minuszeichen (-) im Ergebnisfenster erscheinen. Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie dennoch vermuten, schwanger zu sein, finden Sie unter **Frage 13** weitere Informationen.

Was könnte die Zuverlässigkeit des Ergebnisses beeinflussen?

Die Zuverlässigkeit von Clearblue VISUAL ist geringer, wenn Sie den Test an den Tagen vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen. Wenn Sie das Teststäbchen nicht genau für die vorgegebene Zeit in den Urin halten, kann das Ergebnis unzuverlässig sein. Solange Sie innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests im Kontrollfenster eine blaue Linie sehen, können Sie sich auf das Ergebnis verlassen. Wenn Sie wiederholt unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt suchen. Weitere Informationen finden Sie auch unter **Frage 6**.

Wann kann ich das Ergebnis ablesen?

Sie können das Ergebnis nach 3 Minuten ablesen.

Wie lange kann das Ergebnis abgelesen werden?

Das Ergebnis kann jederzeit nach 3 und bis 10 Minuten abgelesen werden. Veränderungen des Ergebnisses, die nach 10 Minuten auftreten, sollten Sie nicht mehr beachten.

Was tue ich, wenn mein Testergebnis mir „Nicht Schwanger“ anzeigt?

Möglicherweise sind Sie nicht schwanger, die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist noch nicht hoch genug, um nachgewiesen zu werden oder Sie haben sich beim Fälligkeitstag der Periode verrechnet.

- Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode getestet haben, testen Sie am Fälligkeitstag der Periode erneut.
- Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Was soll ich machen, wenn der Test ergeben hat, dass ich schwanger bin?

Wenn der Test anzeigt, dass Sie schwanger sind, sollten Sie einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, damit er Sie hinsichtlich der nächsten Schritte beraten kann.

Weitere Informationen und allgemeine Hinweise zum Thema Schwangerschaft finden Sie auf unserer Webseite:

www.clearblue.com

Für die Verwendung zu Hause. Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur erwärmen lassen.

Von Kindern fernhalten.
Nur als in-vitro Diagnostikum zu verwenden. Entsorgung mit dem Restmüll.

Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Verwenden Sie keinen Test, dessen Haltbarkeitsdatum überschritten ist.



0843

Fragen und Antworten

Wie zuverlässig ist Clearblue VISUAL?

Labortests haben gezeigt, dass der Clearblue VISUAL ab dem Fälligkeitstag der Periode über 99% zuverlässig ist.

Wie funktioniert Clearblue VISUAL?

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration im Körper steigt in der Frühschwangerschaftsphase stetig an. Clearblue VISUAL kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/mL).

Wann kann ich den Test mit Clearblue VISUAL durchführen?

Sie können mit dem Clearblue VISUAL bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode testen. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode testen und das Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“, ist es trotzdem möglich, dass Sie schwanger sind. Die untenstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Testreihe mit Clearblue VISUAL in der Frühschwangerschaft.

*Früh testen

Clearblue empfiehlt Ihnen, erst ab dem Fälligkeitstag der Periode zu testen. Allerdings steigt das Schwangerschaftshormon in der Frühschwangerschaft schnell an und mit Clearblue VISUAL können Sie bereits bis zu vier Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen. Eine klinische Studie mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft und mit Clearblue VISUAL ergab folgende Ergebnisse:

Anzahl der Tage, vor der Fälligkeit der Periode	-1	-2	-3	-4
% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ bekommen haben	98 %	97 %	88 %	56 %

Muss ich Morgenurin verwenden?

Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen wollen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Morgenurin. Ansonsten können Sie den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Vermeiden Sie vor dem Test eine übermäßige Flüssigkeitsaufnahme.

Ich bin mir nicht sicher, wann der Fälligkeitstag meiner Periode ist. Woher weiß ich, dass ich den Test zum richtigen Zeitpunkt mache?

- Um herauszufinden, wann Ihre Periode fällig ist, berechnen Sie Ihre Zykluslänge, indem Sie die Anzahl der Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen.
- Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monaten ausgehen, bevor Sie testen.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre nächste Periode einsetzen soll, empfehlen wir, den Test frühestens 19 Tage nach dem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchzuführen.
- Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ ist und Sie vermuten weiterhin, dass Sie schwanger sind, lesen Sie bitte **Frage 13**.

Können Medikamente oder Erkrankungen mein Ergebnis beeinflussen?

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der einzelnenden Arzneimittel, bevor Sie einen Test durchführen. Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen (Diese Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind).
- Andere fruchtbarkeitsregulierende Behandlungen (z.B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z.B. Pille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie vor Kurzem ein hormonelles Verhütungsmittel abgesetzt haben oder eine fruchtbarkeitsregulierende Behandlung (z.B. mit Clomiphencitrat) durchgeführt haben, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein. Dadurch könnten Sie den Test möglicherweise zu früh durchführen.
- Wenn Sie vor kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten.

Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter (z.B. im Eileiter), Mysterium am Eierstock, die Wechseljahre und einige extrem seltene Erkrankungen können das Testergebnis verfälschen.

- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann es sein, dass Sie später herausfinden, dass Sie doch nicht schwanger sind, weil die Schwangerschaft auf natürliche Weise beendet wurde, was in der Frühschwangerschaft passieren kann.

Wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis erhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Ich habe den Schwangerschaftstest verwendet, aber die sich färbende Testspitze hat sich nicht vollständig rosa verfärbt. Was soll ich jetzt machen?

Wenn sich die sich färbende Testspitze nicht vollständig rosa verfärbt hat, haben Sie möglicherweise nicht genügend Urin verwendet. Sollte aber dennoch die blaue Kontrolllinie im Kontrollfenster innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung des Tests zu sehen sein, dann ist der Test korrekt abgelaufen. Wenn innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint, dann finden Sie unter **Frage 8** weitere Informationen.

Ich habe den Schwangerschaftstest durchgeführt, aber im Kontrollfenster ist keine blaue Linie erschienen. Was soll ich jetzt machen?

Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen. Gründe dafür könnten die folgenden sein:

- Die sich färbende Testspitze wurde nicht nach unten gehalten oder der Test nach der Durchführung nicht auf eine flache Unterlage gelegt.
- Möglicherweise haben Sie zu viel oder zu wenig Urin verwendet. Halten Sie die Testspitze für genau 5 Sekunden in den Urin.

Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststäbchen und halten Sie sich genau an die Anwendungshinweise. Sie können Ihren Urin auch in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und nur die sich färbende Testspitze für 5 Sekunden in die Urinprobe eintauchen.

Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?

- Für das Ergebnis „Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach Testdurchführung eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein '+' Symbol im Ergebnisfenster erscheinen.
- Das Erscheinungsbild des Pluszeichens (+) im Ergebnisfenster kann variieren. Allerdings sollten die beiden Linien des Pluszeichens und die Linie im Kontrollfenster etwa die gleiche Breite haben (siehe Abbildungen A-C).

Abbildung A

Diese Abbildung zeigt das Ergebnis „Schwanger“. Diese Art der Anzeige ist wahrscheinlicher, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG Konzentration in Ihrem Urin möglicherweise relativ gering ist.

Beratungsservice

Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00–16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 08005 894 015* AT 0820 001 148 0844 000 018****

*Anrufe sind kostenlos. **Telefongebühren variieren; bitte mit Ihrem Telefonanbieter prüfen. Bitte halten Sie die Chargennummer (LOT) bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.

IVD	Medizinprodukt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-Code	Nicht wiederverwenden
Temperaturbegrenzung 2°C - 30°C	Verwenden bis	Hersteller		

Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.
© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Clearblue ist eine Marke.

Abbildung B

Diese Art der Anzeige ist nicht ungewöhnlich, wenn Sie schwanger sind und am oder um den Tag der Fälligkeit Ihrer Periode testen, da die hCG Konzentration möglicherweise immer noch relativ gering ist.

Abbildung C

Dieses Bild ist wahrscheinlicher, wenn Sie schwanger sind und einige Tage nach dem Fälligkeitstag der Periode testen, da die hCG Konzentration dann bereits höher ist.

- Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Anwendungshinweise. Für das Ergebnis „Nicht Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Minuszeichen (-) im Ergebnisfenster erscheinen. Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie dennoch vermuten, schwanger zu sein, finden Sie unter **Frage 13** weitere Informationen.

Was könnte die Zuverlässigkeit des Ergebnisses beeinflussen?

Die Zuverlässigkeit von Clearblue VISUAL ist geringer, wenn Sie den Test an den Tagen vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen. Wenn Sie das Teststäbchen nicht genau für die vorgegebene Zeit in den Urin halten, kann das Ergebnis unzuverlässig sein. Solange Sie innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests im Kontrollfenster eine blaue Linie sehen, können Sie sich auf das Ergebnis verlassen. Wenn Sie wiederholt unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt suchen. Weitere Informationen finden Sie auch unter **Frage 6**.

Wann kann ich das Ergebnis ablesen?

Sie können das Ergebnis nach 3 Minuten ablesen.

Wie lange kann das Ergebnis abgelesen werden?

Das Ergebnis kann jederzeit nach 3 und bis 10 Minuten abgelesen werden. Veränderungen des Ergebnisses, die nach 10 Minuten auftreten, sollten Sie nicht mehr beachten.

Was tue ich, wenn mein Testergebnis mir „Nicht Schwanger“ anzeigt?

Möglicherweise sind Sie nicht schwanger, die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist noch nicht hoch genug, um nachgewiesen zu werden oder Sie haben sich beim Fälligkeitstag der Periode verrechnet.

- Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode getestet haben, testen Sie am Fälligkeitstag der Periode erneut.

Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Was soll ich machen, wenn der Test ergeben hat, dass ich schwanger bin?

Wenn der Test anzeigt, dass Sie schwanger sind, sollten Sie einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, damit er Sie hinsichtlich der nächsten Schritte beraten kann.

Weitere Informationen und allgemeine Hinweise zum Thema Schwangerschaft finden Sie auf unserer Webseite:

www.clearblue.com

Für die Verwendung zu Hause. Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur erwärmen lassen.

Von Kindern fernhalten.

Nur als in-vitro Diagnostikum zu verwenden. Entsorgung mit dem Restmüll.

Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Verwenden Sie keinen Test, dessen Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

